

公告

公告日期：112/06/26

公告編號：1120003

公告內容：

1. 檢體加驗報告時效說明



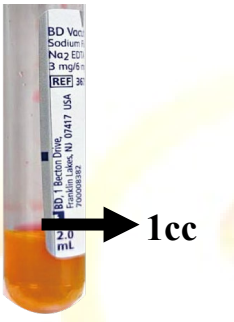
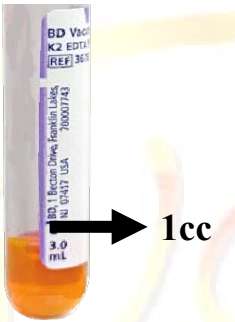
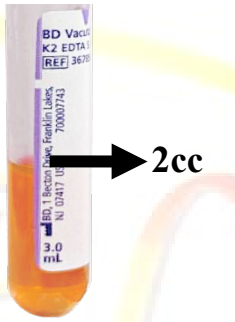

備註：

實驗室每日 **20:00** 打包到期檢體，若欲加驗之檢體為保存效期最後一天，請務必於 **20:00** 前來電通知！

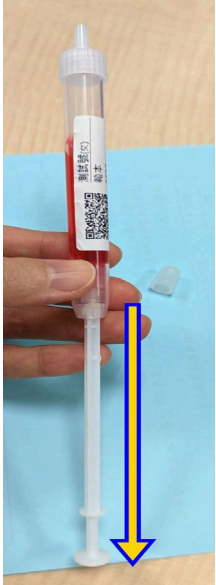
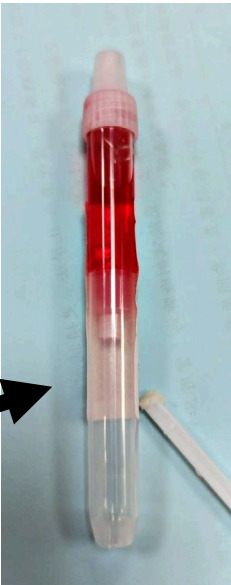
2. 檢體標籤黏貼方式：請保持標籤直向，勿橫貼，保留檢體辨識空間。



3. 採檢量請依下列標示：

| 管別 | 灰頭管 | 紫頭管 | | 藍頭管 |
|-----|--|--|---|---|
| 項目 | 單驗血糖 | 單驗 CBC、 單驗 HbA1C、 同時驗 CBC+HbA1C | 單驗 ESR、 同時驗 ESR+CBC+HbA1C | PT, APTT, LUPS, Protein C, Protein S Platelet clump(血小板 校正用) |
| 檢體量 |  1cc |  1cc |  2cc |  抽至三角形 範圍內 |

4. 白色生化管，抽完、分裝後，請將拉針拉到底再折斷，將蓋子旋緊。

| ○正確 | | ×錯誤 | |
|----------------|---|--------------------------|---|
| 拉針拉到底再折斷，將蓋子旋緊 |  | 拉針未拉到底，直接折斷，容易導致離心時蓋子彈開。 |  |